

Voorbeeldview CORGEE software

(1) **Patiëntinformatie:** wat draagt de patiënt in elk oor?
(bv. *Unaided*, hoorapparaat, CI)

(2) **Globale weergave** van objectief spraakaudiogram: sterkte van de neurale spraakrespons als functie van stimulatie-geluidsniveau.

- Niet-significante responsen vallen in de grijze zone
- Aparte kleuren per luisterconditie (hier: *aided* versus *unaided*)

(3) **Detailweergave** per conditie: toont verloop van respons als functie van meettijd.

- Rode lijn geeft statistische significantie weer: als deze naar 0 gaat is de respons significant

Rapport: objectieve meting spraak verstaan in stilte

(1) Linkeroor Rechteroor

